



Entdecken auch Sie das Geheimnis glücklicher und zufriedener Eltern

**OLAF**  
der elefantastische Nasensauger

## Bedienungsanleitung

- keine schlaflosen Nächte mehr
- sanft, sicher und effektiv
- benutzerfreundlich
- batteriebetrieben



### Produktbeschreibung

Das Gerät befreit durch den gleichbleibenden Unterdruck sanft vom angestauten Nasensekret. OLAF ist batteriebetrieben und daher mobil einsetzbar (z.B. Spielplatz, im Urlaub ...). Der elefantastische Nasensauger ist leicht zu bedienen und zu reinigen.

- Bitte lassen Sie Ihrem Kind Zeit, sich an das Geräusch des Nasensaugers zu gewöhnen.
- Der OLAF-Nasensauger ist speziell für das Absaugen von Nasensekret bei Babys und Kleinkindern entwickelt worden.
- Das Gerät sollte nur von Erwachsenen bedient und ausschließlich zum Absaugen von Nasensekret verwendet werden.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Das Kind sollte behutsam und spielerisch mit dem Nasensauger vertraut gemacht werden (z.B. der verschnupte Teddybär muss zum Onkel Doktor).

### Wichtige Hinweise

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern, die Nasenbluten haben oder anfällig für Nasenbluten sind.

Sollten beim Benutzen des Geräts gesundheitliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.


Aus hygienischen Gründen sollten Sie für jede Person eine separate Silikonspitze verwenden und diese vor und nach jedem Gebrauch sterilisieren.

### Tipps zur Benutzung

- Überprüfen Sie, ob sich das Gerät in einem hygienisch einwandfreien Zustand befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Silikonspitze fest aufsitzt.
- Setzen Sie die Silikonspitze für die Dauer von 3 bis max. 5 Sekunden an das Nasenloch.
- Führen Sie die Silikonspitze sanft in das Nasenloch.
- Bei dickflüssigen oder eingetrockneten Sekreten kann es hilfreich sein, die Nase des Kindes vor der Benutzung des Geräts zu spülen. Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen die Nasenspülung erläutern.
- Um das Saugen wirkungsvoll durchzuführen, halten Sie während des Saugvorgangs das andere Nasenloch vorsichtig zu. Der Vorgang kann nach einer kurzen Pause schonend wiederholt werden, bis das Nasensekret vollständig abgesaugt ist. Danach sollten Sie das Gerät reinigen.

Weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf unserer Website [www.olaf-nasensauger.de/tipps](http://www.olaf-nasensauger.de/tipps)

Wir freuen uns über eine Bewertung bei

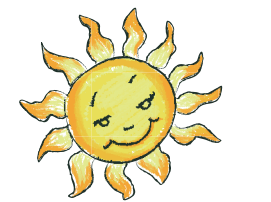

### Reinigung

Die zerlegten Teile des Geräts können im heißen Wasser ausgekocht oder dampfsterilisiert werden. Das Gerät darf nicht mit Benzin oder anderen chemischen Lösungsmitteln gereinigt werden. Nicht spülmaschinengeeignet.

- Ziehen Sie den Kappenaufsatz (D) mit der Kappe (C) vorsichtig vom Gehäuse (A). Achten Sie darauf, das Ansaugrohr (E) nicht abzubrechen. In diesem Fall gilt die Garantie nicht.
- Nehmen Sie die Silikonspitze (B) von der transparenten Kappe (C).
- Drehen Sie die Kappe (C) gegen den Uhrzeigersinn vom Kappenaufsatz (D).
- Achten Sie darauf, dass der grüne Dichtungsring nicht verloren geht.
- Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
- Vergewissern Sie sich, dass das Batteriegehäuse richtig geschlossen ist (um das Eindringen von Wasser zu vermeiden).



Ersatzteile können im Shop unter [www.olaf-nasensauger.de](http://www.olaf-nasensauger.de) nachbestellt werden.

Bitte beachten: Schrauben und Dichtungen dürfen nicht entfernt werden, da das Gerät ansonsten seine Wasserdichtigkeit und somit seine Garantie verliert.

### Technische Daten

**Stromversorgung:** 2 Alkaline-Mignon-(Größe AA)-Batterien  
**Unterdruck:** Maximal 50 kPa  
**Maße:** Länge: 17cm  
 Breite: 4,2cm  
 Höhe: 4,7cm

**Gewicht:** 145g

### Lieferung ohne Batterien

- Das Gerät trocken halten.
- Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, empfehlen wir, die Batterien aus dem Batteriefach zu entfernen.
- Benutzen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen und ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie Batterien für Kleinkinder unerreikbaar auf.
- Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Bitte entsorgen Sie Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen.
- Bitte entsorgen Sie das Gerät, wenn es defekt ist oder keine Nutzung mehr geplant ist, entsprechend der Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie. Für Rückfragen stehen Ihnen die lokalen Behörden, die für die Entsorgung zuständig sind, zur Verfügung.



### Inbetriebnahme



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Beachten Sie alle Hinweise. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät verkaufen, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

### Ein- und Ausschalten des Geräts

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den oberen Teil des blauen Schalters „I“ (G.). Um es wieder auszuschalten, drücken Sie den unteren Teil des blauen Schalters „O“ (H.).

### Einlegen der Batterien

- Ziehen Sie die Batterieabdeckung (I.) vom Gehäuse (A.).
- Legen Sie die 2 Alkaline-Mignon-(Größe AA)-Batterien ein (J.).
- Setzen Sie die Batterieabdeckung (I.) auf das Gehäuse (A.).

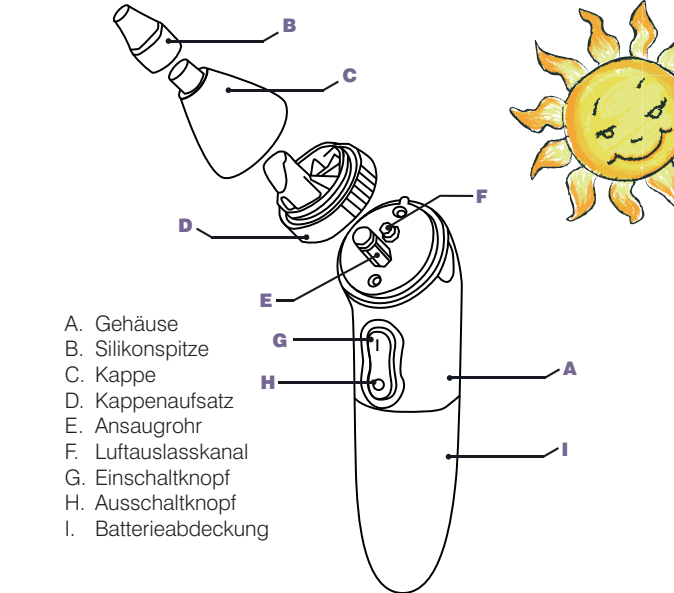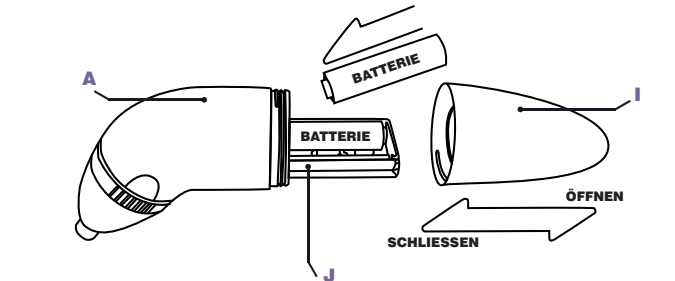


### Einsatzgebiete der verschiedenen Kappenaufsätze

- Pink** für Neugeborene von 0 bis 3 Monate.
- Blau** für regelmäßige dünnflüssige Nasensekrete.
- Weiß** für starke Nasensekrete.



Binder Marketing – Edith Binder  
Tulpenstr. 12/1 • 76307 Karlsbad  
E-Mail: [kontakt@nasensauger-info.de](mailto:kontakt@nasensauger-info.de)  
Website: [www.olaf-nasensauger.de](http://www.olaf-nasensauger.de)

Link zur Website per QR-Code

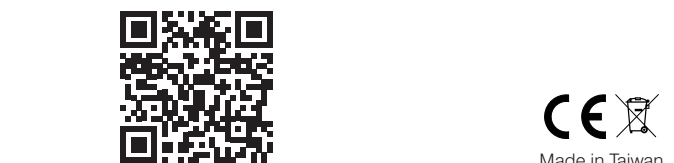

### Olaf's elefantastische Erfindung

Entdecken auch Sie das zauberhafte Kinderbuch passend zu unserem elefantastischen Nasensauger im Online Shop, bei Amazon oder in Ihrer Buchhandlung mit der ISBN: 978-3-00-052088-4

Jetzt in unserem Online-Shop bestellen! [www.olaf-nasensauger.de](http://www.olaf-nasensauger.de)

